

Update 26.0.0 qubeSERIE

Release Notes Version 26.0.0

Allgemein

- Stabilitäts- und Performance-Optimierungen

Neue Oberfläche

- **qubeD60-DX** - simuliert den BeneHeart D60 & DX von Mindray

qubeD60-DX




qubeC3/C3T

- Aufgrund einer Herstelleränderung im Defibrillations- und AED-Modus wurde in der Standardansicht das Kurvenfeld CPR entfernt. Dies kann nach eigenem Ermessen im Layout-Editor in **qubeCLOUD** wieder geändert werden.

Erforderliche Schritte:

1. Bei **qubeCLOUD** anmelden
2. SIMKONFIG
3. Monitor auswählen
4. DEFI -> LAYOUT DEFINIEREN

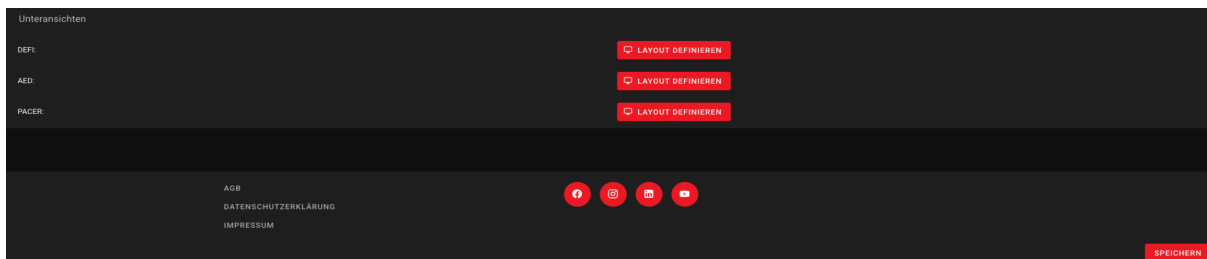

5. Layout ändern und SPEICHERN
6. In SIMKONFIG ebenfalls SPEICHERN
7. **qubeCONTROL** mit internetfähigem WLAN verbinden und synchronisieren
8. **qubeMONITOR** mit **qubeCONTROL** verbinden

qubeCONNECT

- Unsere neue Websocket-Verbindung erlaubt es Drittanbietern, ihre Simulationssysteme nahtlos in unsere **qubeSERIE** zu integrieren. Vitalparameter können auf Monitoren und Respiratoren angezeigt werden. Interaktionen mit diesen, wie Defibrillationen oder Beatmungen, können auf den angeschlossenen Geräten nachgebildet werden.

AmbuMan-Schnittstelle

- Die Schnittstelle zu AmbuMan wurde unter Berücksichtigung von Kundenfeedback grundlegend überarbeitet für eine bessere Performance.

Wichtiger Hinweis

- Bitte achten Sie beim Wechsel auf Version 26.0.0 darauf, das Update auf allen genutzten iPads durchzuführen.
- Mit dem Wechsel ist auch ein Update der **qubeBOX**-Firmware auf Version 1.2.3. notwendig. Hierfür müssen alle Sensoren während des Updates dekonnektiert werden. Eine Anleitung für das Update finden Sie [hier](#).