

# Update 6.1.0 qube**SERIE**

## Release Notes Version 6.1.0


### Allgemein

- Stabilitäts- und Performance-Optimierungen
- Portrait-Modus deaktiviert - konsistente Anzeige im Querformat
- Vorbereitung zu Intensitäts-Sequenzen: Bei Defibrillatoren mit wechselbarem Patientenmodus können in der **qubeCLOUD** zukünftig auch Intensitäts-Sequenzen für Kinder zur Kaskaden-Defibrillation hinterlegt werden

---

### Neue Oberflächen

- **qubeMX800** - simuliert den IntelliVue MX800 von Philips
- **qubeAED1000** - simuliert den LIFEPAK 1000 von Stryker

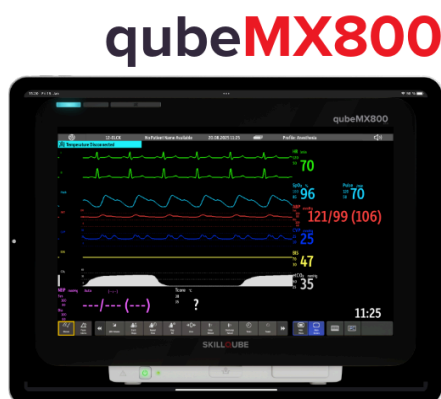

## qube**CONTROL**

- Erweiterung um neue Laborwerte
  - Sensorstatus-Überwachung der **qubeBOX**: Zuverlässige Warnmeldungen beim Trennen von Sensoren
  - Auto-Synchronisation mit der **qubeCLOUD** bei Anwendungs-Start
  - Lizenzverwaltung: Lizenzen können nun direkt in der Anwendung getrennt werden
- 

## qube**C3** & qube**C3T**

- Auto Start Metronom: Startmodus in der **qubeCLOUD** konfigurierbar
  - NIBD: Countdown während Intervallmessung hinzugefügt
  - Darstellung des Monitors optimiert
- 

## qube**ZERO**

- Stoppuhr-Funktion integriert
  - Akustische Signale für bessere Wahrnehmbarkeit optimiert
- 

## qube**7**

- AWC (Analysis Whilst Compressing) integriert
- 

### Kontakt

support@skillqube.com  
+49 6222 – 386265  
skillqube.com/support