

Update 26.1 qube**SERIE**

Release Notes Version 26.1

Allgemein

- Stabilitäts- und Performance-Optimierungen
-

Neue Oberflächen

- **qubeEMV+** - simuliert den EMV+ von ZOLL
- **qubeZVent** - simuliert den Z Vent von ZOLL

qube**EMV+**




qube**ZVent**



qubeC3/qubeC3T


- **CPR-Referenzbereich:** Der Referenzbereich der CPR-Kurve kann nun zwischen dem Standardwert (5–6 cm) und einer reduzierten Tiefe (4–5 cm) angepasst werden.

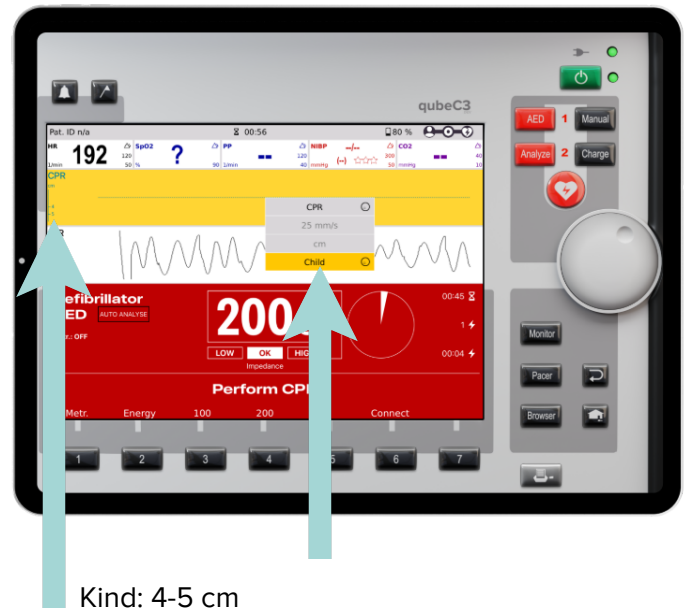

- **Optimierte NIBP-Qualitätsanzeige:** Die Darstellung der Messqualität des nicht-invasiven Blutdrucks (NIBP) mittels der Sterne-Anzeige wurde verbessert.

qubeCONTROL

- **Hinweis zur Hardpaddle-Unterstützung:** Unterstützt ein Monitor im AED-Modus keine Hardpaddles, wird dies dem Trainer ab sofort direkt in **qubeCONTROL** signalisiert.

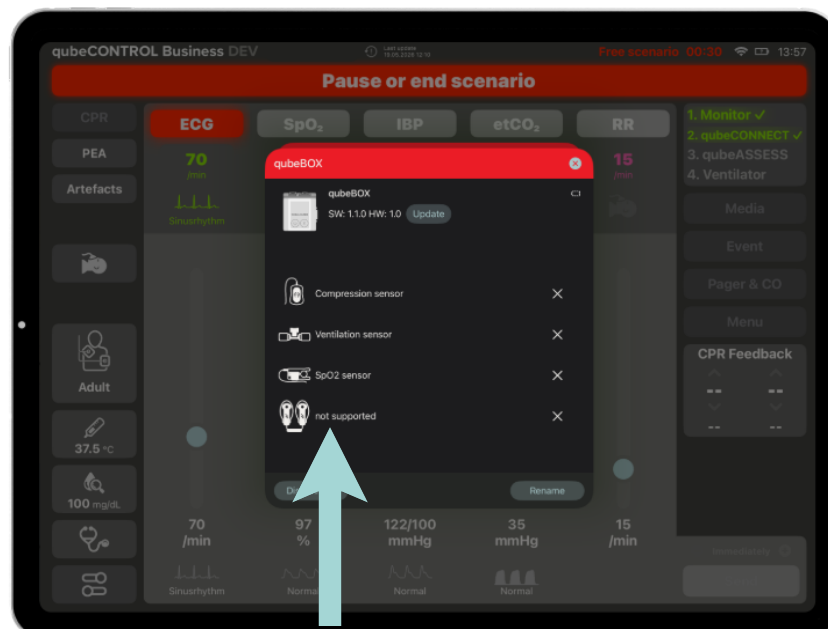


- **Erweiterte Patienten-Details:** In vordefinierten Szenarien werden Name und Alter des Patienten nun direkt in **qubeCONTROL** angezeigt.



- **Flexible Szenarien-Sortierung:** In der Szenarien-Übersicht können die Szenarien ab sofort nach Name oder Änderungsdatum (jeweils aufsteigend oder absteigend) sortiert werden.

qubePMD / qubeR / qubeX

- **Detailliertes CPR-Feedback:** Die Darstellung des CPR-Feedbacks wurde optimiert und bietet nun eine präzisere und detailliertere Visualisierung der Druckentlastung.

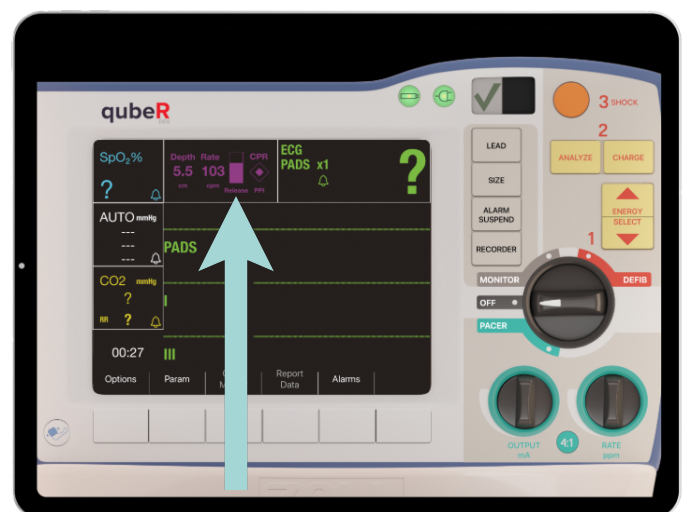

Wichtiger Hinweis

- Bitte achten Sie beim Wechsel auf Version 26.1 darauf, das Update auf allen genutzten iPads durchzuführen.
- Ein Update der **qubeBOX**-Firmware auf Version 1.2.3 ist weiterhin erforderlich, sofern noch nicht geschehen.
 - Upgrade von **qubeSERIE** Version 6.1.0 oder älter: Bitte trennen Sie während des Firmware-Updates alle Sensoren. Eine Anleitung für das Update finden Sie [hier](#).
 - Upgrade von **qubeSERIE** Version 6.2.0 oder neuer: Die Sensoren müssen für zukünftige **qubeBOX**-Updates nicht mehr dekonnektiert werden.

Kontakt

support@skillqube.com
+49 6222 – 386265
skillqube.com/support